

QUICK GUIDE

BACT GRAM NEG/POS -MASTITISTEST

1



Fyll provröret
(Rene händer och rent juver!!)

2



Fyll testpipetten
("Bubblan" trycks ihop helt)

3



Fyll testchippen
(Pipetten töms helt)


4



Lägg testchippen i inkubatoren
eller i värmeskåp i 14-16 timmar




BACT - innan påfyllning

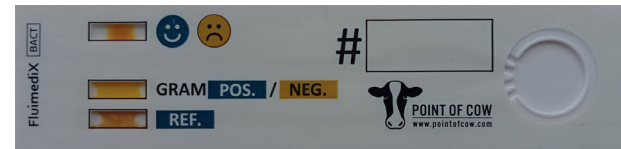


BACT - efter inkubationen


Ingen växt: Ingen penicillin

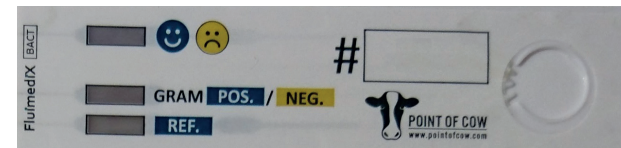

GRAM-negativ: Ingen penicillin

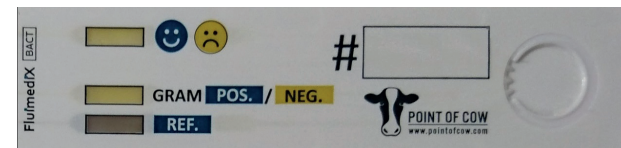

GRAM-positiv: Penicillin-behandling

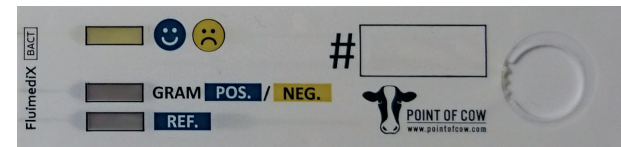

RESULTAT



Info: pointofcow.com, tlf. +45 93 94 98 86